



SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

Ihr Partner im Kreißsaal
Partura[®] – Das Entbindungsbett



A Sense of Company

Mehr als 95 Jahre Erfahrung machen SCHMITZ zu einem der international führenden Hersteller von medizintechnischen Produkten.

Tradition im Familienunternehmen wird gelebt. 18 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit zeigen eine hohe Identifikation mit unseren Werten und der Firmenphilosophie.


Seit 2012 führen Friedrich und Matthias Schmitz das Unternehmen in der vierten Generation.

Wir bekennen uns zum Standort Deutschland und sind mit unserer Heimatregion tief verwurzelt. Wir entwickeln und fertigen hier.

Wir arbeiten mit Zulieferern, die zu 90 % aus Deutschland und zu 60 % aus der Region stammen.

Made in Germany



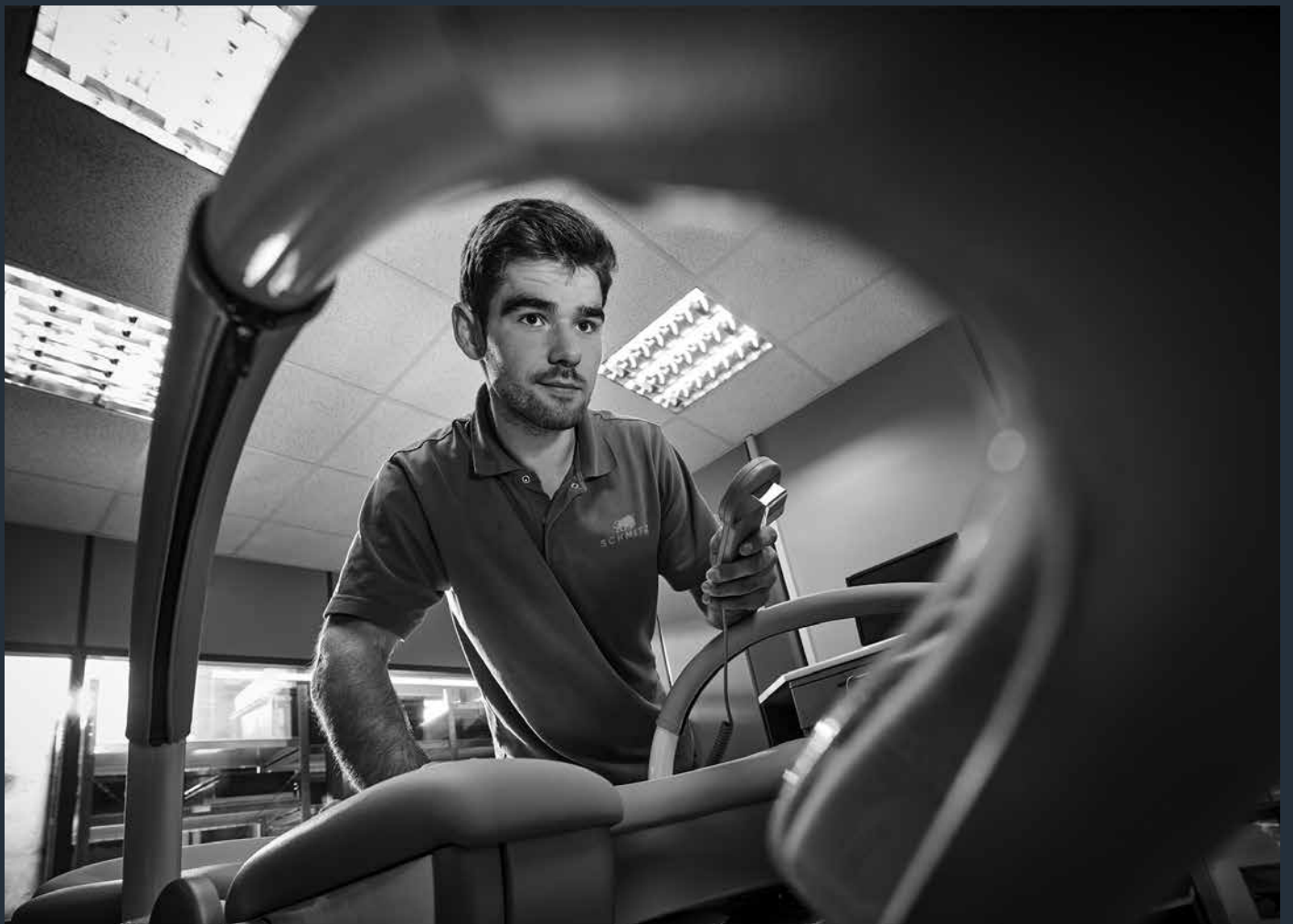

A Sense of Care

Wir verstehen und leben Dienstleistungen mit dem Anspruch einer hohen Kundenzufriedenheit. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Einrichtung.


Wirtschaftlichkeit durch Langlebigkeit, das können Sie von uns erwarten.

Mit einem durchdachten Servicekonzept und einer umfassenden Betreuung steht SCHMITZ von Anfang an als Partner an Ihrer Seite.

Technischer Kundenservice

T +49 (0)2377 84 550

service@schmitz-medical.com

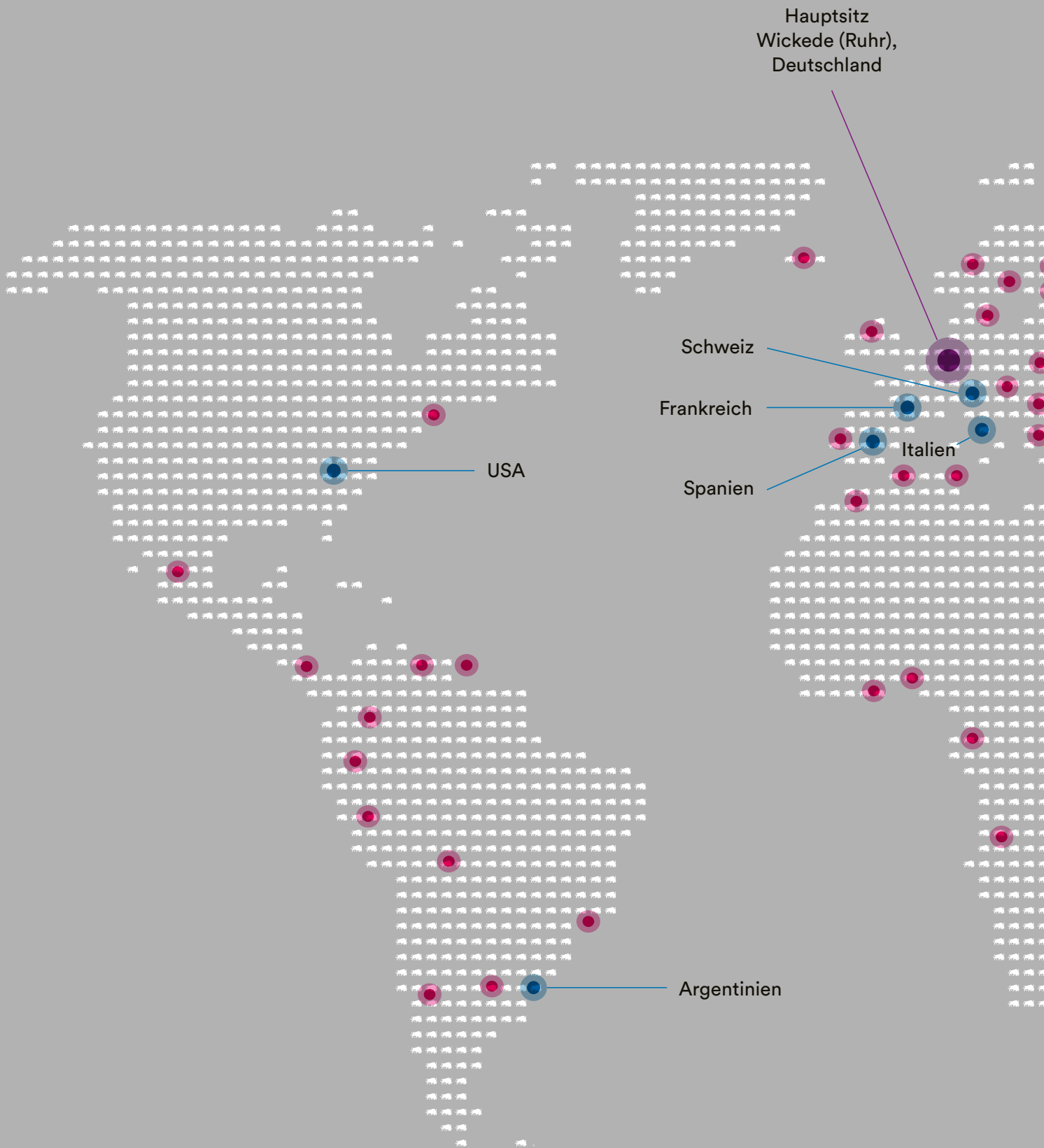

● International über 80 Handelspartner

● Vertriebsniederlassungen

SCHMITZ – weltweit vertreten





Konzept: Karin Berghammer/Iris Podgorschek
Design: podpod design

Partura® 

Komfortabel und vielseitig – mit Sicherheit

Möglichst viel Bewegungsfreiheit für die werdende Mutter während der Eröffnungs- und Austreibungsphase und eine individuelle Verstellung des Bettes per Handbedienung – jederzeit. Das ist die Maxime hinter dem Konzept des Entbindungsbettes.

Auf der angenehm gepolsterten Liegefläche ist genug Platz für eine aktive Unterstützung durch den Partner. Das Fußteil kann auch als Sitz für die Hebamme genutzt werden.

Das Entbindungsbett von SCHMITZ wird jedem Anspruch gerecht:

Es verbindet ansprechendes Design mit hohem Komfort für die werdende Mutter und optimalen Arbeitsbedingungen für das Geburtshilfeteam.

Zusätzlich sind die geschlossenen, glatten Bettverkleidungen und die Polsterflächen leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Und – falls notwendig – lässt sich das Bett durch ein paar Handgriffe so verstellen, dass eine schnelle ärztliche Intervention möglich ist.

Partura® – Das Entbindungsbett für eine sichere und sanfte Geburt.





Partura®

Komfortabel und vielseitig – mit Sicherheit

Vielfältige Möglichkeiten

Die unterschiedlichen Gebärpositionen in Kombination mit einer sehr hohen Bewegungsfreiheit zeichnen das Partura® aus.

Individuelle Farbgestaltung

Mit unserer großen Farbauswahl passt sich das Partura® perfekt an jede Räumlichkeit an und schafft eine angenehme Atmosphäre. Gerne können Sie alle möglichen Kombinationen testen. Nutzen Sie bitte unseren Farbkonfigurator auf unserer Webseite, siehe QR-Code unten auf dieser Seite.

Gemeinsam „Leben“ erleben

Die Begleitung der Entbindung durch den Partner.

Ein schönes Erlebnis für die werdende Familie.

Durch die große Liegefläche und das herausfahrbare Fußteil kann der Partner auf Wunsch immer mit eingebunden werden.

Entdecken Sie unseren
neuen Produkt- und
Farbkonfigurator!



Partura® Lagerungen



Eröffnungsperiode

Bett in niedrigster Position (64 cm) zum Wechsel zwischen Entspannung und Bewegung, die geringe Betthöhe erleichtert den Ein- und Ausstieg



Geburt in Steinschnittlage

klassische Position



Geburt mit Beckenhochlagerung bei Schulterdystokie

operativen Eingriffen oder Manualhilfe



Eröffnungs- und/oder Übergangsperiode in Knie-/Ellenbogenlage

bei Pressdrang trotz Restmuttermund und bei intrauteriner Asphyxie



Geburt in Knie-/Ellenbogenlage

bei Mehrgebärenden mit vorangegangener Epi
zur Entlastung des Dammes und bei besonders großen Kindern




Post partum bei Geburt in Knie-/Ellenbogenlage

die junge Mutter kann sich nach der Geburt einfach zurücklehnen,
ohne sich umdrehen zu müssen



Austreibungsperiode in vertikaler Haltung mit hochgestellter Rückenlehne

bequeme Sitzposition; durch die Ausnehmung in der Matratze entsteht
kein Druck auf den Damm. Manualhilfe bei Beckenendlage möglich

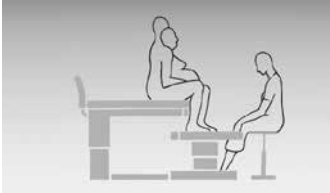

Austreibungsperiode in vertikaler Haltung mit Partner

die Gebärende kann sich an ihren Partner anlehnen, Körperkontakt



Geburt in tiefer Hocke

Optimierung der Geburtsachse, maximale Kyphosierung,
Damm ist entlastet




Geburt in tiefer Hocke mit Partner

der die Gebärende beim Durchtritt des kindlichen Kopfes anheben kann,
Körperkontakt



Operative Geburt

Zangen- oder Vakuumentzug, Manualhilfe bei Beckenendlage, Post partum
zur Versorgung des Dammes, bei manueller Plazentalösung

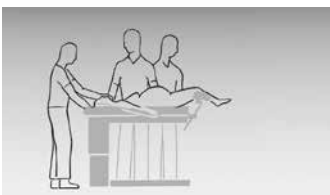


Sectio Caesarea im Kreißsaal

bei absoluter Indikation



Schocklage

bei Nabelschnurvorfall oder Kreislaufkollaps

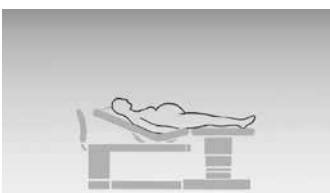

Beinhochlagerung

zur Entspannung

Partura® CE^{MD} und Zubehör

Modell-Nr. Beschreibung



140.1010.0 Partura® Entbindungsbett

Hauptteil mit Sitz und Rückenlehne, Fußteil.
Fahrbar mittels Lenkrollen mit Zentralfeststellung über Fußpedal. Haupt- und Fußteil sind trennbar, das Fußteil kann unter das Hauptteil geschoben werden und rastet in drei Positionen ein. Inkl. Zwei Handbedienungen mit Kabelverbindung.

Die serienmäßige Ausstattung des Partura® Entbindungsbettes finden Sie auf Seite 19.



104.6010.0 Kissen zur Rückenunterstützung

104.6020.0 Spannbezug (o. Abb.) für zweiteiliges Polster, weiß, waschbar bis 95 °C.

Modell-Nr. Beschreibung



104.6030.0 Haltebügel
zur Stabilisierung des Schultergürtels, aus Stahlrohr pulverbeschichtet, neigbar und höhenverstellbar, mit zwei drehbaren Spannkloben aus CNS 18/10, zur Anbringung an Seitenschienen



104.6040.0 Seitenstützen (Paar)
abnehmbar, aus Stahlrohr pulverbeschichtet, Befestigung aus CNS 18/10, seitlich am Rückenteil montiert



104.6050.0 Spülbecken
aus CNS 18/10, 355 × 325 × 100 mm (L x B x T)



104.6060.0 Fußstützen (Paar)
Befestigung aus CNS 18/10, Fußplatten Kunststoff, grau



Partura®

Komplett ausgestattet für die komfortable Geburt

Für eine bessere Zugänglichkeit für Hebamme und Arzt kann das Hauptteil vom Fußteil getrennt werden – und gleichzeitig auch als Sitz oder Ablage genutzt werden.

- Parallele und separate elektromotorische Höhenverstellung von Haupt- und Fußteil.
- Einfache Reinigung und Desinfektion durch geschlossene, glatte Flächen, abnehmbare Polster.
- Fahrbar mittels Lenkrollen – Zentralfeststellung über Fußpedal.
- 22 Standardfarbtöne für eine attraktive Farbgestaltung.
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten, hohe Stabilität und viel Platz für unterschiedlichste geburtserleichternde Positionen – auch unter Einbeziehung des Partners.
- Elektrische Verstellfunktion über 2 bequem erreichbare Handbedienungen.
- Sanfter Anlauf der Bettbewegungen.
- Multifunktionale Rückenlehne, einsteckbar am Haupt- und Fußteil.
- Beinhalter mit Kugelgelenk für schnelle Verstellung aus der Park- in die Akutposition.
- Sicherheit bei kurzzeitigem Stromausfall durch integrierte Akkus.



Beinhalter lassen sich einfach und schnell unter die Liegefläche schwenken und wieder in die Behandlungsposition bringen.



Rückenlehne auch am Fußteil einsteckbar.



Parkposition der Handgriffe an der Kopfseite des Hauptteiles bei Nichtgebrauch.



Hauptschalter, Potentialausgleich, Akkuzustandsanzeige, Kaltgeräte-Steckdose



Infusionsstange an der Kopfseite oder seitlich links und rechts einsteckbar.



Feststellhebel für Fußteilarretierung.



Handgriffe zum leichten Manövrieren des Fußteils.



Zwei Handbedienungen mit Spiralkabel, links und rechts am Hauptteil.

Partura® C€^{MD}**Serienmäßige Ausstattung**

Hauptteil mit Sitz und Rückenteil und Fußteil, fahrbar mittels Lenkrollen, Zentralfeststellung. Haupt- und Fußteil sind trennbar. Das Fußteil kann unter das Hauptteil geschoben werden, vier Rastpositionen. Sitzteil mit Ausschnitt, Radius 150 mm.

Zweiteiliges Polster für Haupt- und Fußteil, aus hochelastisch beschichtetem Schaumstoff, feuchtigkeitsundurchlässig, gegen Verrutschen gesichert.

1 Bezug zweiteilig, weiß, kochfest bis 95 °C.

Verkleidungen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farben nach Farbkarte. Rückenlehne an der Kopf- und Fußseite einsteckbar, mit Kunstlederbezug steingrau 96.

Zwei Beinhalter nach Göpel, Chromnickelstahl 18/10, Integralschaumpolster silbergrau, höhenverstellbar. Zwei Drehgelenke zur Aufnahme der Beinhalter. Schnell verstellbar aus der Park- in die Akutposition. Zwei Handgriffe, Chromnickelstahl 18/10, Integralschaum silbergrau, seitlich einsteckbar.

Infusionsstange mit 4 Haken, Chromnickelstahl 18/10, zur Befestigung an der Kopfseite und im Bereich der Handgriffe, höhenverstellbar. Rückenstütze im Bereich des Sitzausschnittes, halbrund, Integralschaum silbergrau, für die Geburt in tiefer Hocke.






Zwei Handbedienungen mit Spiralkabel, links und rechts am Hauptteil, für die stufenlosen elektromotorischen Verstellungen:

- Höhenverstellung der Liegefläche des Hauptteils
- Rückenteilverstellung
- Sitzteilverstellung
- Neigung der Liegefläche (Schocklage)
- Höhenverstellung des Fußteiles (bei Verbindung mit Hauptteil)

Sicherheit bei kurzzeitigem Stromausfall durch integrierte Akkus.

Farben

- 2-teiliges Polster für Haupt- und Fußteil steingrau 96.
- Rückenlehne steingrau 96.
- Beinhalterschalen, Handgriffe und Rückenstütze Integralschaum silbergrau.
- Stahlteile pulverbeschichtet nach SCHMITZ-Farbkarte.

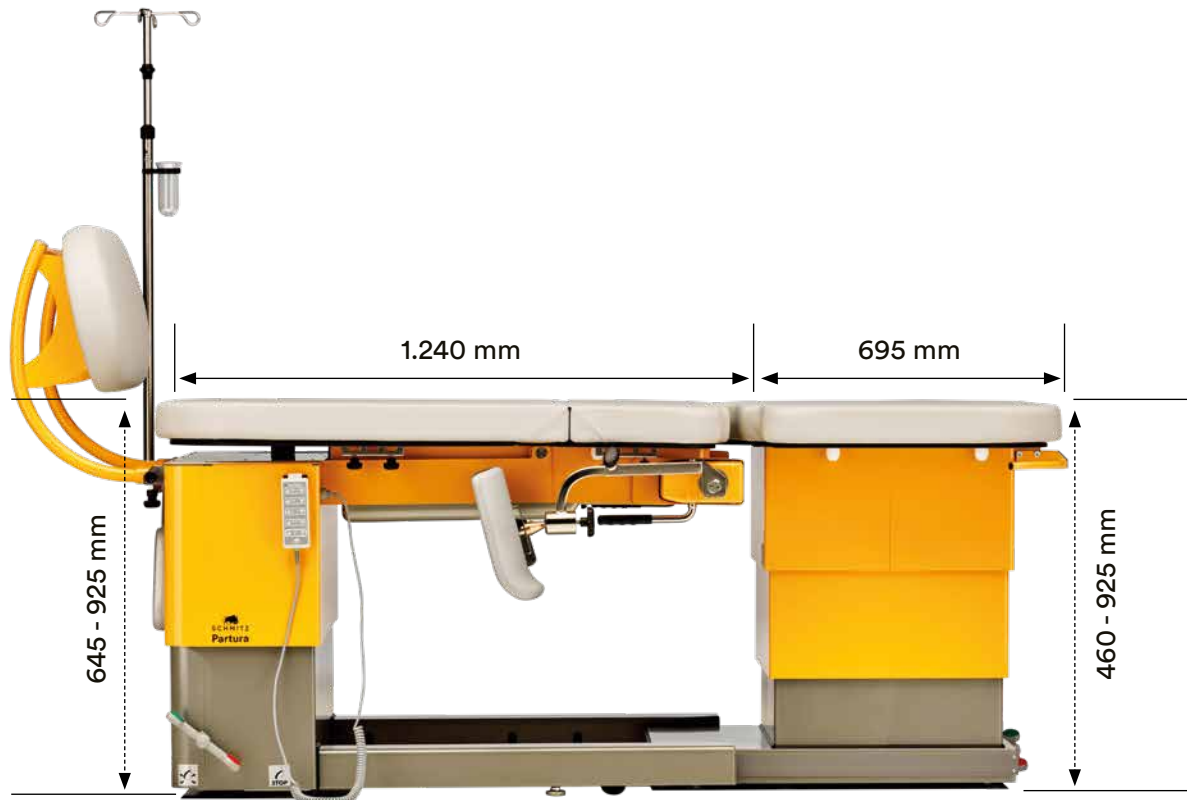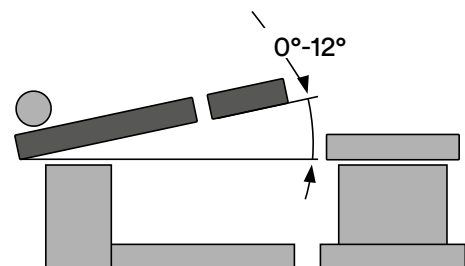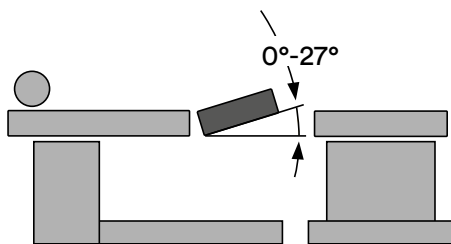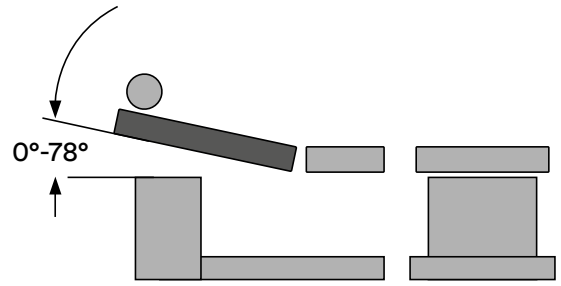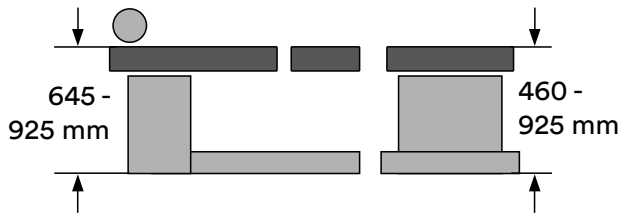

Partura® Verstellfunktionen und Maße

Maße

| | |
|---|--------------------------|
| Höhenverstellung des Hauptteils | von 645 - 925 mm |
| Höhenverstellung des Fußteils (nur bei Verbindung mit Hauptteil möglich) | von 460 - 925 mm |
| Außenmaße des Entbindungsbettes mit eingesteckter Rückenlehne | 2.330 × 1.015 mm (L x B) |
| Liegefläche | 1.950 × 950 mm (L x B) |
| Länge Rückenlehnenmatratze | 890 mm |
| Länge Sitzteilmatratze | 350 mm |
| Länge Fußteilmatratze | 695 mm |
| Matratzendicke | 80 mm |
| Neigungswinkel Hauptteil | 0 - 12 Grad (Schocklage) |
| Neigungswinkel Rückenteil | 0 - 78 Grad |
| Neigungswinkel Sitzteil | 0 - 27 Grad |
| Sichere Arbeitslast Hauptteil | 220 kg |
| Sichere Arbeitslast Fußteil | 135 kg |
| Gewicht Fußteil | 110 kg |
| Gewicht Hauptteil | 265 kg |
| Gesamtgewicht | 375 kg |
| Netzspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 0,76 KW |
| Schutzklasse | I |

Hinweis!

Wir empfehlen eine jährliche Wartung des Partura® Entbindungsbettes.


SCHMITZ unterstützt Sie hierbei durch einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Servicevertrag.

Sprechen Sie uns gerne an!







Lackierungen

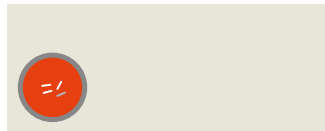

grauweiß
RAL 9002

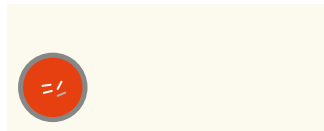

reinweiß
RAL 9010

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

seerosenweiß
RAL 0758510



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
safranhellorange
RAL 0608530




signalgelb
RAL 1003



blutorange
RAL 2002



lotusrosa
RAL 3608510

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

tricottliederweiß
RAL 3108510



tennisblau
RAL 2307020



hellblau
RAL 2606030



saphirblau
RAL 5003



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
bleichblau
RAL 2308010



limonengrün
RAL 1008060



filigrangrün
RAL 1207020



eiskaltgrün
RAL 1209030



weißaluminium
RAL 9006



graualuminium
RAL 9007



anthrazitgrau
RAL 7016



antimikrobiell
Diese Farben haben antimikrobielle Eigenschaften



Polster- und Lackierungsfarben

Entdecken Sie neue Farbwelten

Mit insgesamt 19 Polster- und 18 Lackierungsfarben haben Sie viele Möglichkeiten, in Ihren Räumen Farbakzente zu setzen.

Ob gedeckt oder fröhlich, klassisch oder modern, elegant oder extravagant – bei uns finden Sie garantiert schnell den passenden Farbton.

Wir beraten Sie auch gerne persönlich – sprechen Sie uns an!



Lassen Sie sich inspirieren:
www.schmitz-medical.com

Wir empfehlen:

Zubehör für die Polsterreinigung

2026973



| Modell-Nr. | Beschreibung |
|----------------------|--|
| 2019878 (o. Abb.) | Spezialreiniger für Kunstleder Sprühflasche mit 500 ml Inhalt (Verpackungseinheit 3 Flaschen) |
| 2026973 | Reinigungsset Polster eine Sprühflasche mit 500 ml Inhalt und eine Bürste |

Detaillierte Informationen zur Reinigung und Desinfektion der Polster finden Sie in unseren jeweiligen Gebrauchsanweisungen.



‘Ein starkes Unternehmen, dem man vertrauen kann – kompetent, ehrlich, fair, zuverlässig.’

Diese Werte spiegeln sich in unseren Produkten und deren Qualität wider. Eine Kombination aus Langlebigkeit, richtungsweisender Spitzentechnologie und ansprechendem Design.

Innovation hat bei uns Tradition. Seit mehr als 95 Jahren entwickeln und produzieren wir medizintechnische Produkte, auf die weltweit Ärzt:innen und Patient:innen vertrauen.

Unsere Produkte entstehen in enger Zusammenarbeit mit Mediziner:innen, dem Know-How sowie der Leidenschaft unserer Mitarbeiter:innen.

Dank der stetigen Weiterentwicklung und unserem hohen Anspruch an Qualität und Funktionalität nimmt SCHMITZ mit seinen Produkten und Dienstleistungen eine führende Position am Markt ein.

SCHMITZ – Ihr Partner für die Medizintechnik im Krankenhaus und in der Praxis.





Gynäkologische Untersuchungs- und Behandlungsstühle



Urologische Untersuchungs- und Behandlungsstühle



Integriertes und mobiles Full-HD Videokoloskop




Modulares Ver- und Entsorgungskonzept



Allgemeines medizinisches Mobiliar



SCHMITZ Care® Connect

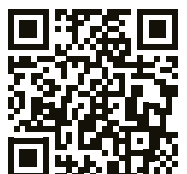



Kontakt

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostefeld 29
58739 Wickede (Ruhr)



Alle mit dem CE-MD-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung 2017/745/EU (MDR) sowie dem Medizinprodukteanpassungsgesetz und sind Medizinprodukte der Risikoklasse I.



Alle mit dem einfachen CE-Kennzeichen gekennzeichneten Produkte entsprechen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sowie der Verordnung über elektrische Betriebsmittel.

Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!

T +49 (0)2377 84 0

F +49 (0)2377 84 162

zentrale@schmitz-medical.com

Export:

T +49 (0)2377 84 0

F +49 (0)2377 84 135

export@schmitz-medical.com

Hotline Technischer Service:

T +49 (0)2377 84 550

F +49 (0)2377 84 210

service@schmitz-medical.com

Informationen zu weiteren Niederlassungen weltweit finden Sie auf unserer Internetseite:

www.schmitz-medical.com



* Dieser Artikel ist Handelsware, welcher unter dem OEM-Namen vertrieben wird.

Unsere Leistungen verstehen sich ab Werk. Lieferung über unsere Fachhandelspartner und Niederlassungen. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, alle angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Farbabweichungen sind möglich. Die in diesem Katalog genannten Artikel sind nicht für den Verkauf in die USA zugelassen. Schutzgebühr 3,00 Euro.